

Moldex製防塵マスクの使用における補足警告

本書には、Moldex製防塵マスクをご利用の方すべてにご注意いただきたい警告および使用上の制限事項を記載しています。Moldex製防塵マスクを使用する場合、製品パッケージに記載されている警告などの内容や公開されている関連情報に加えて、必ず本書に記載されている警告および制限事項を守って正しくお使いください。

本防塵マスクを正しく使用することで、CBRN（化学物質、生物物質、放射性物質、核兵器）への接触による疾患や死亡の危険性を軽減できますが、こうした危険性を完全に排除することはできません。CBRNには、死亡、重傷あるいは外的損傷につながる細菌、生物毒素、ウィルスなどが含まれます。CBRNが長期的および短期的にどのような危険をもたらすかは分かりません。また、こうした危険をもたらす汚染度および汚染状態の程度も不明です。本防塵マスクを使用する場合、疾病対策センター（CDC）の健康に関する勧告、地方、州、または連邦政府が定めるCBRNに対する防塵マスクの使用法に従ってください。なお、本防塵マスクはすべてのCBRNに対応できるものではありません。

Moldex製あるいは他社で販売されている防塵マスクの中には、保護レベルが高く効果的なモデルがあります。防塵マスクの使用の有無、種類、サイズ、保護レベル、製品の選択は、使用者の判断によって行い、Moldex社は一切責任を負わないものとします。

背景

有害な工業汚染物に対する防塵マスクの試験および認証は、疾病対策センター（CDC）の所属機関であり米国政府機関でもある国立労働安全衛生研究所（NIOSH）が管轄しています。また、防塵マスクの正しい選択法と使用法については、職業安全衛生管理局（OSHA）などの政府機関で規定しています。

化学兵器、細菌兵器、生物学的有害物質を取り扱う場合に使用する防塵マスクの認証試験はNIOSHが行っています。ただし、通常OSHAなどの政府機関では、こうした物質による汚染に関する基準は定められておりません。

Moldex社は、CBRNに関して、作業員や一般使用者に対して、いかなる防塵マスクの使用も推奨するものではありません。

CBRNはその存在や放出が確認できない場合がありますのでご注意ください。

お使いの方すべてに対する警告

- 本防塵マスクは、作業環境許容濃度限界値（PEL: Permissible Exposure Limit）内の物質を取り扱う場合に責任者の判断に基づいて使用してください。
- 防塵マスクを使用する場合、正しく装着できるかを確認してください。正しく装着できない場合は使用を止め、危険な場所へは近寄らないでください。
- 本防塵マスクは、ひげなどでマスクと顔との間の密着性が保てない場合は使用しないでください。
- 本防塵マスクは、総合的な呼吸プログラムの一部として正しく装着した場合のみ、大気中の危険物質から使用者を保護します。ただし、危険物質を完全遮断することはできません。
- 突然予期せぬCBRNが放出し、本防塵マスク以外に防塵マスクをお持ちでない場合、危険を回避する手段として本防塵マスクをお使いください。汚染された場所から退避されるまでは顔から本防塵マスクを取らないでください。
- 本防塵マスクは、責任者の許可なく再使用しないでください。また、再使用するために保管したり、首にかけたりしないでください。本防塵マスクは、責任の指示に従って有害危険物として廃棄してください。
- 責任者の指示によっては他の個人用保護器具を使用してください。防塵マスクに触れる場合あるいは防塵マスクを取り外す場合、必要に応じて保護手袋はめてください。また、防塵マスクと手袋は責任者の指示に従って廃棄してください。
- 疾病対策センター（CDC）、地方、州、または連邦政府が特定危険有害物の取り扱い時に使用する防塵マスクの使用に関して、新しいガイドラインを発表した場合あるいはガイドラインを改訂した場合は厳守してください。

結核に対する防塵マスクの使用に関する警告

OSHAとCDCでは、作業現場における結核感染予防プログラムの一環として、防塵マスクの使用を奨励しています（42CFR84項で承認）。

現在得られているデータから結核感染に対する呼吸保護の効果を測ることはできませんが、総合的な呼吸保護プログラムの一環として、適切なMoldex製防塵マスクを正しく使用することにより、結核感染の危険性を軽減することができます。

- 以下に記載された使用上の制限事項および「お使いの方すべてに対する警告」に記載されたすべての警告事項を厳守してください。
- Moldex製防塵マスクを使用した場合、当該国の保険医療機関の総合的な呼吸保護プログラムに従ってフィルターを交換・廃棄してください。
- 殺菌剤で消毒したMoldex製防塵マスクを再使用する場合、当該国の保険医療機関に相談し、Moldex製防塵マスクとお使いの殺菌剤の適合性試験を実施してください。殺菌剤の使用により防塵マスクの効果が失われ、適切な保護ができなくなる場合があります。

使用上の制限事項

- 防塵マスクを使用することで、大気中の危険物質や病原菌に接触あるいは感染する危険性を削減することができます。ただし、こうした危険性を完全に除くことはできません。本防塵マスクは、必ず総合的な呼吸保護プログラムの一環として使用してください。正しく装着しなければ、防塵マスクで呼吸官を保護することができません。
- 防塵マスクに液体（血液や体液を含む）が付着した場合、汚染した場所からすぐに離れてください。使用した防塵マスクは廃棄し、新しいものと交換してください。
- Moldex製防塵マスクは絶対にお子様に使用しないでください。

Moldex製防塵マスクの詳細につきましては、モルデックスジャパン株式会社（電話：06-4964-2866）、米国モルデックス社（電話：+1-310-837-6500、内線554）、現在お使いの責任者、或いは米国CDC疾病予防管理センター（ホームページwww.cdc.govまたは電話：+1-404-498-1515）、迄お問い合わせください。

2007年03月12日改訂

9701-806 REV A 3/08



再生紙を使用しています