



# HandyStrap® (ハンディストラップ)タイプ防塵マスク

## 2600DS2シリーズマスク装着手順

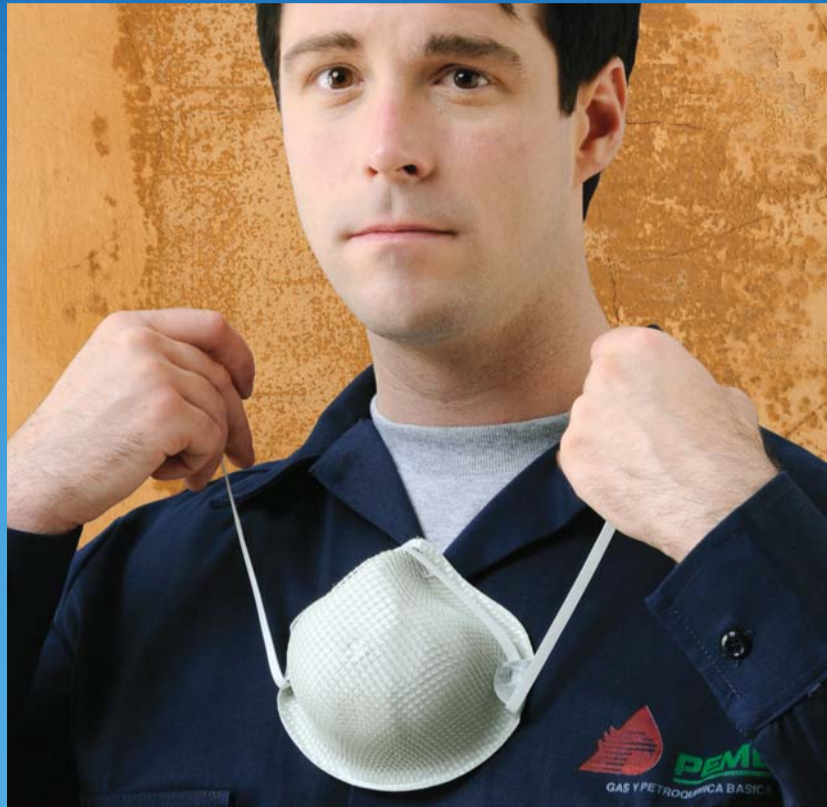


**1** ストラップの留め具を持ち、マスク本体を正面に垂らしたまま、留め具を首の後ろで留めます。

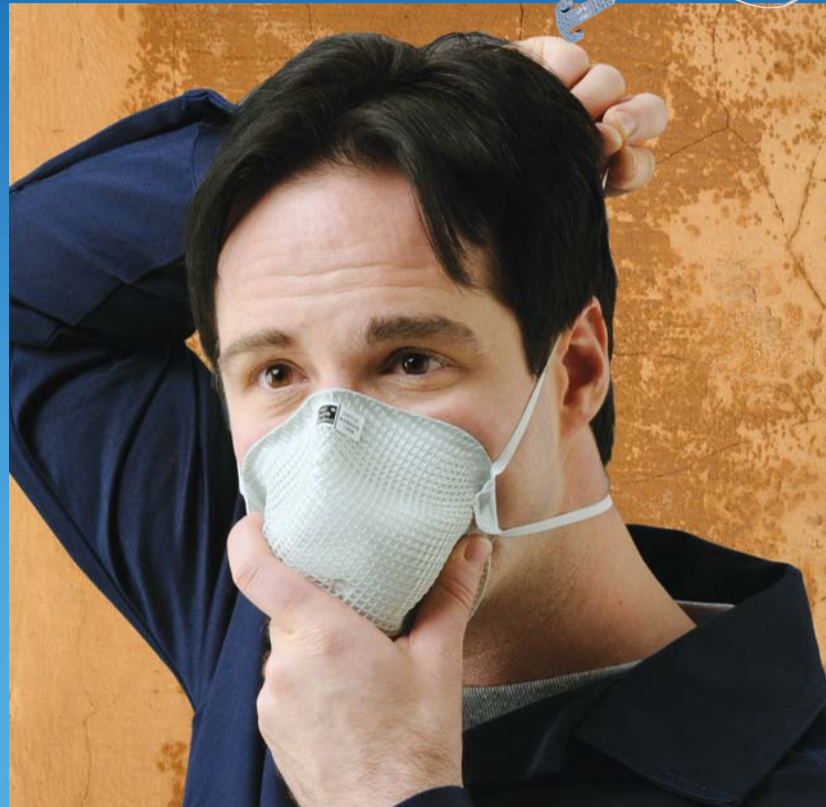

**2** A) 顔にマスク本体を当て、頭頂部にストラップの  
ん中部分を当てます。マスクの折り返し部分が  
スク内側に折れないよう気をつけて下さい。  
B) ストラップの位置を、しっかりフィットするよう  
調整して下さい。



**3** 感染区域に入る場合、毎回フィットチェックを行って下さい。両手でマスクを覆い、強く吸い込んで下さい。マスク内側の陰圧が感じられるはずですが、もしマスクから空気漏れがある場合、ストラップを横から後ろへ引っ張るか、マスクの位置を直して下さい。確実にフィットするまで調整するか、或いは安全管理者から指示をもらうようにして下さい。不十分なフィットのまま汚染区域に入ると病気感染、或いは死亡に至ることがあります。

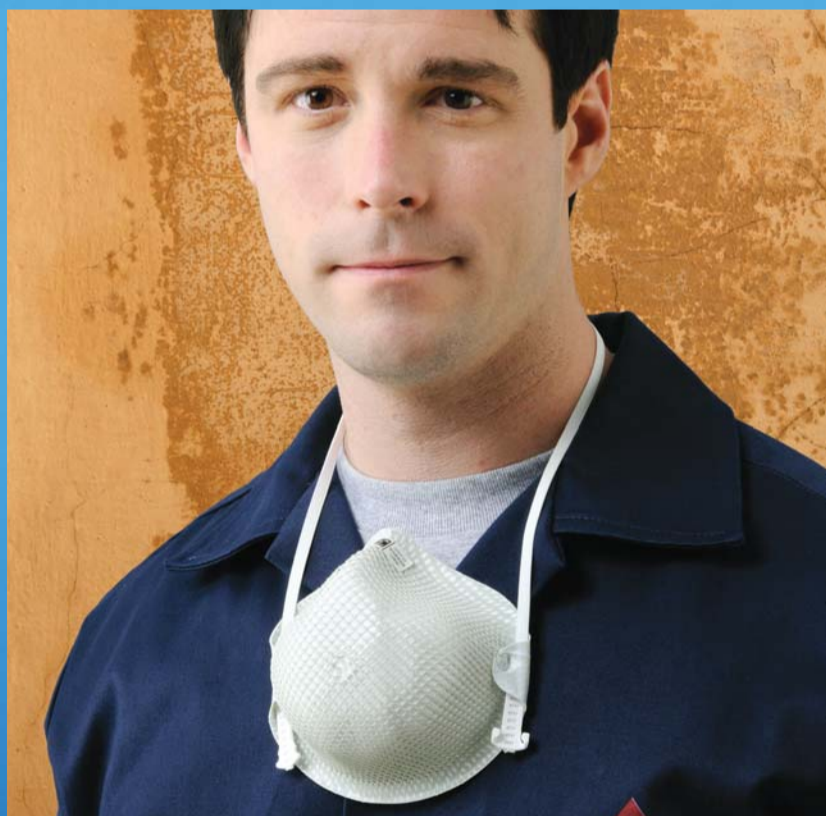

**4** 首にマスクを掛ける場合は：  
A) 留め具をはずします。  
B) ストラップを首に掛けるようにします。  
C) マスク本体を正面に垂らします。  
または、  
A) 頭頂部のストラップをはずします。  
B) マスクが邪魔にならないようにストラップを調整します。