

ESTES SÃO PULMÕES DESCARTÁVEIS, NÃO SÃO?




Segure o respirador na mão com o contorno nasal moldado (ponta estreita) na ponta dos dedos, permitindo a tira da cabeça cair abaixo da mão.



Coloque o respirador abaixo do queixo com o contorno nasal moldado (ponta estreita) para cima. Não use com apenas uma tira. **Quando trocar de qualquer modelo/tamanho por outro respirador, você precisa fazer o teste de encaixe.** (A Flange 2200N95 precisa ser diminuída dentro do respirador. Levante a tira superior para a parte traseira superior da cabeça. Puxe a tira pequena abaixo sobre a cabeça, abaixo das orelhas, em volta do pescoço).



Puxe a tira de baixo encurtando-a sobre a cabeça, debaixo das orelhas e em volta do pescoço. Ajuste o respirador para um encaixe confortável.

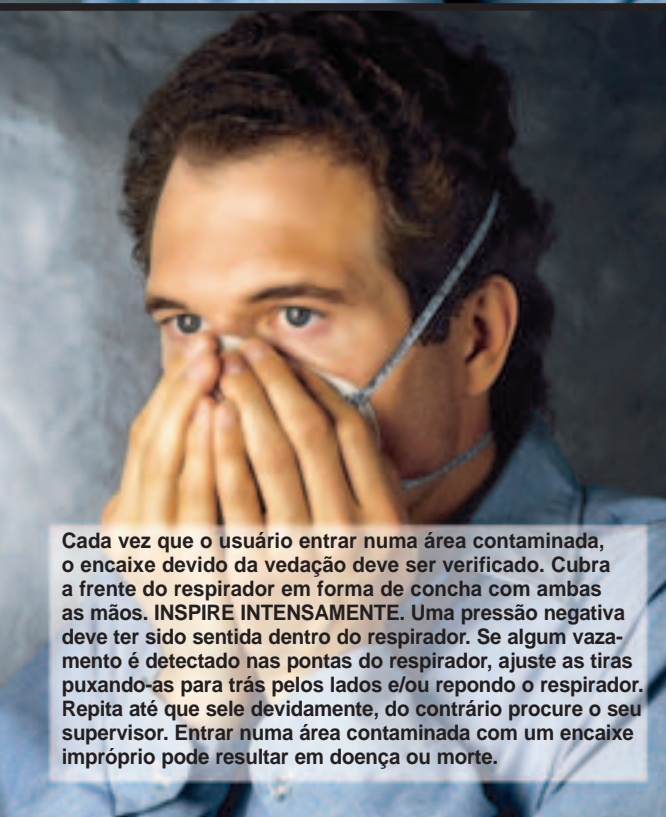

Cada vez que o usuário entrar numa área contaminada, o encaixe devido da vedação deve ser verificado. Cubra a frente do respirador em forma de concha com ambas as mãos. **INSPIRE INTENSAMENTE.** Uma pressão negativa deve ter sido sentida dentro do respirador. Se algum vazamento é detectado nas pontas do respirador, ajuste as tiras puxando-as para trás pelos lados e/ou repondo o respirador. Repita até que sele devidamente, do contrário procure o seu supervisor. Entrar numa área contaminada com um encaixe impróprio pode resultar em doença ou morte.



AVISO

Se falhar de seguir todas as instruções e avisos no uso devido deste respirador, isso pode reduzir a eficiência do respirador, proteção do usuário e pode resultar em doença e/ou morte. É de responsabilidade do usuário de obter um encaixe devido. Para informação adicional recorra a seu supervisor e retire-se a caixa/bolsa ou fax (11) 3815-8388.

AVISO AO USUÁRIO

Os usuários precisam seguir as instruções a cada vez que o respirador é usado. É da responsabilidade do usuário obter o encaixe devido. Para escolher o tamanho correto você precisa testar o encaixe e usar a verificação da vedação. Se você não obtiver o encaixe devido não entre na área contaminada. Os regulamentos da OSHA 1910.134 (f) requerem que o usuário deva ser testado para o encaixe antes de ser atribuído a ele um respirador. O usuário deve estar barbeado (sem barba). Qualquer pêlo de rosto, tais como barbas e costeletas podem evitar que o respirador seja encaixado devidamente.

MOLDEX[®]
Ideas that wear well.™

MOLDEX-METRIC, INC.
FAX (11) 3815-8388
www.moldex.com

e-mail: moldexmetric@terra.com.br
Patente dos E.U.A. #D285,374, #4,850,347,
#4,384,577, #5,149,468.
A Moldex é uma marca registrada.
Feita nos E.U.A. 9702-783 REV A 3/06

Distribuído por:

