

PlugStation®



Tapones auditivos aquí



1. COLOQUE LA MANO BAJO EL PLUGSTATION

Gire lentamente la manecilla, hasta que los tapones auditivos caigan sobre su mano.




2. ENROLLE Y COMPRIMA

Con manos limpias sostenga el tapón entre el dedo pulgar y el índice como se muestra en la imagen. Enrolle y comprima el tapón hasta que obtenga un pequeño cilindro sin arrugas.



3. INSERTE

Para asegurar el ajuste correcto, coloque la mano detrás de la cabeza y jale la oreja de manera suave hacia arriba y hacia abajo como se muestra. Introduzca el tapón correctamente comprimido dentro del canal auditivo. Manténgalo en posición 30-60 segundos hasta que el tapón auditivo se expanda completamente. Suelte y presione nuevamente durante 5 segundos para asegurar el ajuste.

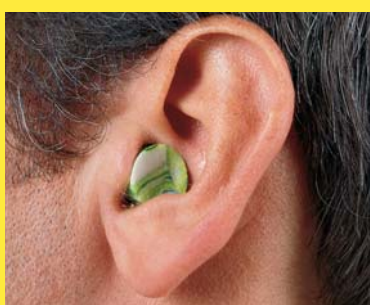

4. AJUSTE CORRECTO

Cuando se inserta correctamente, el borde plano del tapón se ve colocado en la abertura del canal del oído como se muestra en la imagen.

Instrucciones de uso y ajuste de protectores auditivos de espuma para las marcas Sparkplug®, Purafit®, Goin'Green®, Meteors®, Small, Mellows® y tapones auditivos Camo. Vea las advertencias en la etiqueta de la estación de tapones.



5. AJUSTE INCORRECTO

Cuando una parte del tapón no se encuentra dentro del canal auditivo, esto reduce la efectividad en la reducción del ruido.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO DE MOLDEX:
+1 (800) 421-0668 ext. 512/550 or +1 (310) 837-6500 ext. 512/550

www.moldex.com

MOLDEX
Ideas that wear well.®



Alinea la parte superior de PlugStation aquí.