

4700N100

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS
CON BANDA SMARTSTRAP®,
VÁLVULA VENTEX® Y SELLO FACIAL
DE ESPUMA.




MÁS AIRE. MÁS DURABLE.

Respiración más fácil y mayor confort son lo que usted consigue cuando usa un respirador AirWave®. La superficie más amplia del diseño de ondas patentado, permite mayor flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de la máscara.


MAYOR COMODIDAD. MAYOR USO. MAYOR DURABILIDAD.

El diseño único de Flexfit® se mueve con su cara para comodidad durante todo el día. La exclusiva SmartStrap fresca y cómoda permite ajustar el respirador con un ajuste personalizado. La SmartStrap® también permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no esté en uso. Tiene un suave sello de espuma alrededor de la cara para un ajuste sin puntos de presión. Mayor confort significa mayor cumplimiento. La malla Dura-Mesh® resiste el colapso al calor y la humedad por lo que su respirador dura por más tiempo. El uso prolongado, significa menos residuos y disminución de costos. Además es libre de metal.

Ajustable

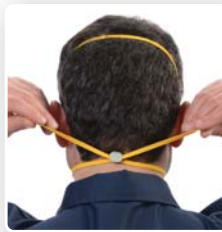

Colgable

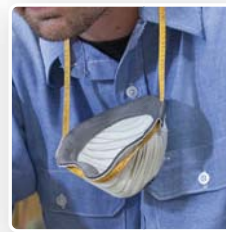

Sello Facial de Espuma



PROTECCIÓN N100

Eficiencia del 99.97% contra partículas no aceitosas, para entornos en los que se aplica una norma OSHA específica para una sustancia (plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA) así como, fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de baterías, soldadura, corte y vertido de metal.

- Diseño exclusivo de ondas para una respiración más fácil
- Menor resistencia, mejor transpiración
- 99.97% de eficiencia contra partículas no aceitosas
- Diseño FlexFit® que se mueve fácilmente con su cara y se mantiene en su lugar
- Malla Dura-Mesh® resiste colapsarse con el calor y la humedad
- Válvula Ventex® permite que el aire caliente fluya más rápido para que los trabajadores respiren mejor y mantenerse más frescos
- Suave Banda SmartStrap® es colgable y ajustable
- Sello facial de Espuma para mayor comodidad y sin puntos de presión
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad
- Cumple con resistencia al calor y la flama acuerdo con ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1

4700N100

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS
CON BANDA SMARTSTRAP®,
VÁLVULA VENTEX® Y SELLO FACIAL
DE ESPUMA.



ÚSESE CONTRA

1. Partículas de aerosoles, no aceitosos.

NO SE USE CONTRA

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidos o son un peligro inmediato para la vida o la salud.
2. Concentraciones de partículas que superan la concentración máxima de uso o 10 veces el límite de exposición permisible de OSHA, o lo que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en aerosol, chorro de arena o partículas de materiales que generen vapores nocivos.
4. Neblinas con base de aceite.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe ser utilizado en atmósferas que contienen menos de 19.5% de oxígeno.
2. No permanecer en el área contaminada si se produce algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
3. Salga del área contaminada y reemplace el respirador si este se encuentra dañado, deformado, no se ha obtenido un ajuste apropiado o la respiración se vuelve difícil.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluyendo el medio filtrante y área de fijación de la banda, en caso de fisuras o daños. Perforaciones por grapas ó en el área de pegado no afectan el desempeño del respirador.
5. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
6. Almacene los respiradores no utilizados en caja / bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las regulaciones locales.
8. Dónde haya neblinas de aceite presentes, ya sea solas o en combinación con partículas sólidas, no utilizar por más de un turno de trabajo de ocho horas. Deseche no más tarde de ocho horas después del primer uso. No exceda 10 veces PEL (ver No se use contra, punto 2) y 200 mg de carga por respirador. Es responsabilidad del usuario saber el PEL y la concentración del contaminante, el ritmo máximo de trabajo del empleado, y cualquier otra información específica del lugar de trabajo para calcular la carga del filtro. Cuando están presentes solo partículas no aceitosas, disponer a más tardar 30 días después del primer uso.
9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad "use by" impresa en la caja/bolsa.
10. Si se utiliza para soldadura, utilice la protección adecuada para ojos y cara.

LÍNEA DE SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia técnica, llame al Departamento de Servicio Técnico en Moldex +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 o 1 (800) 421-0668 ext. 512/550. En México y América Latina al +52 (442) 2341230.



Moldex México/América Latina
Calz. Los arcos 168-3
Querétaro, Qro. 76060
Tel. +52 (442) 2341230
Fax. +52 (442) 2341231
Email: Ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

MOLDEX TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT:
+1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500 ext. 512/550

ADVERTENCIAS AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y el desgaste durante todo el tiempo de exposición. De no hacerlo, se reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede causar enfermedades o la muerte.
2. Antes de utilizar, el usuario primero debe ser entrenado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de conformidad con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser peligrosos para su salud incluyen las que usted no puede ver, probar, ni oler.
4. Este producto no se ha vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado en cuidado de la salud o situaciones relacionadas, donde puede haber la posibilidad de contacto con enfermedades o riesgos biológicos. Si usted está considerando este tipo de usos, primero llamar al Departamento de Servicio Técnico de Moldex, +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 o +1 (800) 421-0668 ext. 512/550. En México y América Latina al +52 (442) 2341230, Fax +52 (442) 2341231.

DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES - USA

Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232
+1 (800) 421-0668

National Institute for Occupational Safety and Health

THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR	CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		4700N100	
84A-6963	N100		A B C J M N O P

1. Protection

N100 Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

Empaque

Modelo #	Descripción	Cantidad	Cartón
4700N100	Respirador Desechable Mediano/Grande N100	5 por Caja	6 Cajas

GARANTÍA LIMITADA - AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines particulares y todas las demás garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cumplidos por los productos vendidos.

Remedios exclusivos: daños por el incumplimiento de esta garantía limitada se limitan a la sustitución de tal cantidad de productos Moldex que se demuestre tener defectos de fabricación. Salvo lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable por cualquier pérdida, daños, o pasivo, directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes que surjan de una venta, uso o mal uso, o la imposibilidad de utilizar los productos por parte del usuario.

Distribuido Por:

