

Dura-Mesh® (デュラメッシュ) 2ストラップ式防塵マスク

2200DS2 シリーズマスク装着手順



1 マスク本体を正面にしてストラップを手の下に垂れ下げながら鼻当て部分を指で支えマスクを持ちます。



2 あご部分から鼻当て部にマスクを当てます。マスク内側の鼻当てパッドがきちんとフィットするようにして下さい。上の方のストラップを頭に掛けて下さい。次に下の方のストラップを引っ張りながら、頭の上から通し耳の下の首回りに掛けて下さい。ストラップ1本だけで装着しないよう気をつけて下さい。



3 ストラップの位置を、しっかりフィットするように調整して下さい。



4 感染区域に入る場合、毎回フィットチェックを行って下さい。両手でマスクを覆い、強く吸い込んで下さい。マスク内側の陰圧が感じられるはずですが、もしマスクから空気漏れがある場合、ストラップを横から後ろへ引っ張るか、マスクの位置を直して下さい。確実にフィットするまで調整するか、或いは安全管理者から指示をもらうようにして下さい。不十分なフィットのまま汚染区域に入ると病気感染、或いは死亡に至ることがあります。

MOLDEX[®]
Ideas that wear well.[®]

モルデックスジャパン株式会社(MOLDEX JAPAN K.K.)
〒550-0002 大阪府西区江戸堀1-1-1 江戸堀センタービル9階
電話:06-6225-1030 ファックス:06-6225-1111

9701-834 REV REV B 7/10