

MOLDEX®

Ideas that wear well.®



SÉRIE 1500


RESPIRATEURS N95 CONTRE LES PARTICULES & MASQUES CHIRURGICAUX ESTINÉS AUX SOINS DE LA SANTÉ DIRECTIVES D'AJUSTEMENT

1



Tenir le respirateur dans la main, le contour du nez (extrémité étroite) au bout des doigts, les courroies de tête pendant sous la main.

2

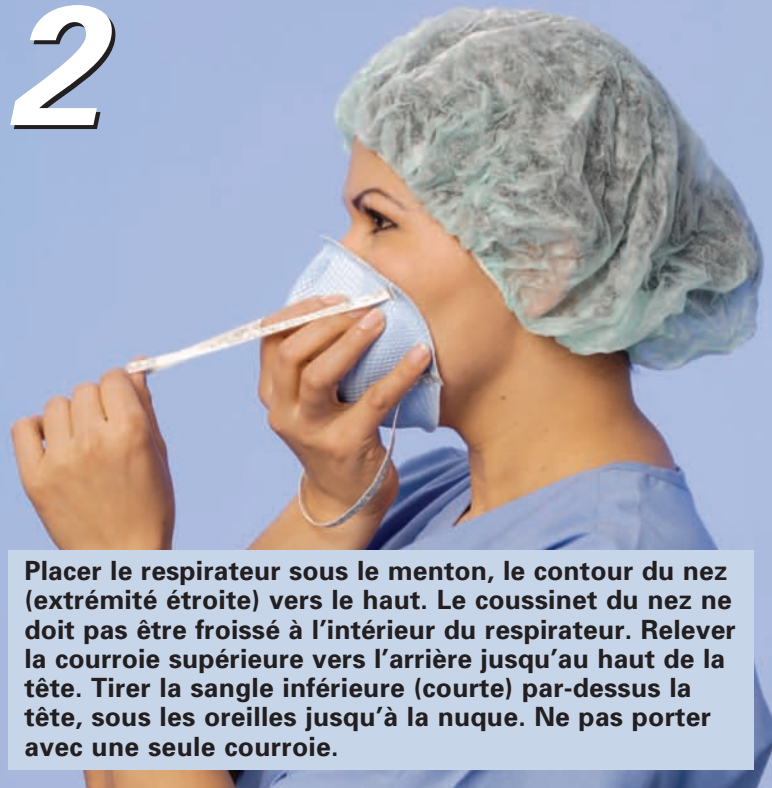


Placer le respirateur sous le menton, le contour du nez (extrémité étroite) vers le haut. Le coussinet du nez ne doit pas être froissé à l'intérieur du respirateur. Relever la courroie supérieure vers l'arrière jusqu'au haut de la tête. Tirer la sangle inférieure (courte) par-dessus la tête, sous les oreilles jusqu'à la nuque. Ne pas porter avec une seule courroie.

3



Ajuster le respirateur pour qu'il soit confortable.

4

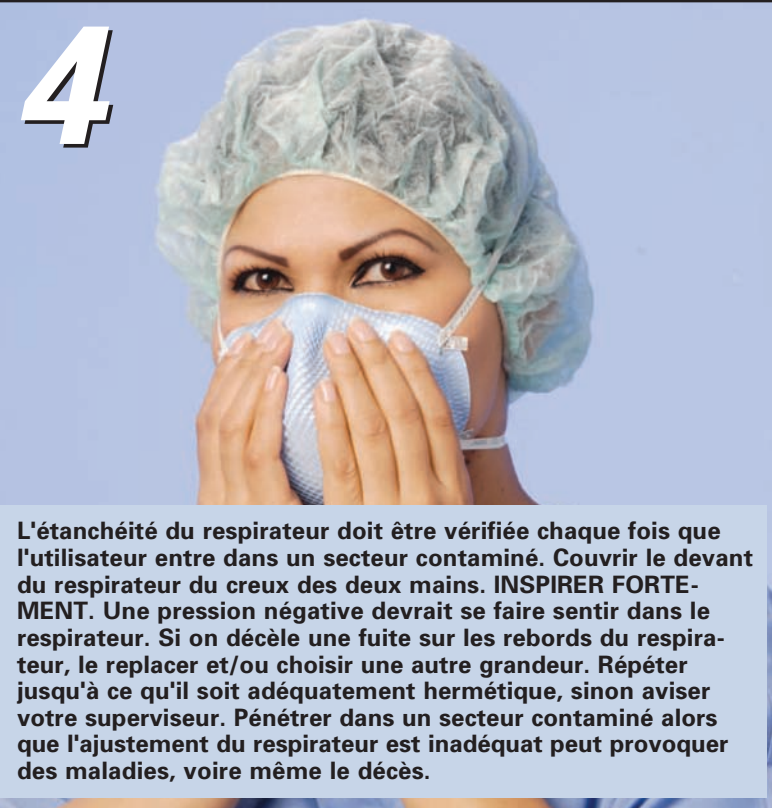

L'étanchéité du respirateur doit être vérifiée chaque fois que l'utilisateur entre dans un secteur contaminé. Couvrir le devant du respirateur du creux des deux mains. **INSPIRER FORTEMENT.** Une pression négative devrait se faire sentir dans le respirateur. Si on décèle une fuite sur les rebords du respirateur, le replacer et/ou choisir une autre grandeur. Répéter jusqu'à ce qu'il soit adéquatement hermétique, sinon aviser votre superviseur. Pénétrer dans un secteur contaminé alors que l'ajustement du respirateur est inadéquat peut provoquer des maladies, voire même le décès.

ALERTE

Le défaut de se conformer à toutes les instructions et tous les avertissements quant à l'utilisation adéquate de ce respirateur en réduira l'efficacité et la protection de l'utilisateur, pouvant entraîner des maladies et le décès. Pour plus d'information, consulter votre superviseur, lire toutes les directives sur la boîte et appeler 800-421-0668, poste 512/550.

Moldex-Metric, Inc.
10111 W. Jefferson Blvd.
Culver City, California 90232
Téléphone 800-421-0668 • 310-837-6500 poste 512/550
Télécopieur 310-837-9563

www.moldex.com • sales@moldex.com
Brevets E.U. #D285,374, #4,850,347.

Moldex et Dura-Mesh sont des marques déposées de Moldex-Metric, Inc.
Le concept du Mesh est une marque de commerce de Moldex-Metric, Inc.

9700V-776 REV E 08/08 Fabriqué aux É.U.



Printed on Recycled Paper

ISO 9001:2000
MOLDEX
REGISTERED

INSTRUCTIONS À L'UTILISATEUR

L'utilisateur doit suivre ces instructions chaque fois qu'il porte le respirateur. Il est de sa responsabilité de l'ajuster correctement. Si vous ne pouvez obtenir un ajustement adéquat, n'entrez pas dans le secteur contaminé. La réglementation OSHA exige que l'utilisateur subisse un test d'ajustement avant qu'on lui assigne un respirateur. L'utilisateur doit être rasé de près. Toute pilosité faciale, telle barbe ou longs favoris, peut nuire à l'étanchéité du respirateur. Les lunettes ne doivent pas nuire au contact entre le visage et la surface d'étanchéité du respirateur.

AVERTISSEMENT

Ce produit ne comporte aucune composante en latex de caoutchouc naturel. Cependant, les personnes très sensibles au latex de caoutchouc naturel peuvent éprouver une réaction allergique. Ce produit n'élimine pas les risques de maladie ou d'infection. Changer immédiatement de respirateur si ce dernier vient en contact avec du sang ou des fluides, incluant des liquides organiques. OSHA n'a pas établi de niveau d'exposition permmissible pour les agents biologiques dans l'air ambiant. Ce produit n'est pas vendu avec un avertissement ou des directives d'utilisation pour le personnel en industrie ou en environnements connexes. Si vous projetez de telles utilisations, communiquer au préalable avec le Département de Service Technique Moldex, 800-421-0668, poste 512/550.