

# 0102

## BITTER® KIT FIT TEST

### TESTE DE VEDAÇÃO DOS RESPIRADORES

Teste a vedação dos respiradores de partículas Moldex. Verifique se os respiradores estão sendo usados corretamente e se encaixam satisfatoriamente no rosto de cada colaborador. Certifique-se de que os usuários estejam devidamente protegidos

### FÁCIL DE UTILIZAR

O Kit Fit Test Moldex contém tudo o que é necessário para conduzir um teste de vedação qualitativo. As instruções escritas fornecem um passo a passo fácil de realizar. É um teste simples de aprovação / reprovação. A sensibilidade ao sabor do Bitter é verificada. O usuário veste um respirador de partículas Moldex, o capuz é colocado no colaborador e a solução de teste é borrifada no capuz.



### MÉTODO DE TESTE DE VEDAÇÃO APROVADO

Os procedimentos para realização dos “Ensaio de Vedação” qualitativos devem ser seguidos de acordo com o Programa de Proteção Respiratória – Recomendações, Seleção e Uso de respiradores, do Ministério do Trabalho e Fundacentro, Anexo 11.

A Instrução Normativa n01, de 11/04/1994, torna obrigatória as recomendações contidas nesta publicação. A OSHA exige que o usuário faça um teste de ajuste antes de usar um respirador. O kit de teste de ajuste Moldex Bitter pode ajudá-lo a atender aos requisitos de teste de ajuste do programa de respirador estabelecidos pela OSHA 1910.134.

### RECURSOS

- Inclui tudo o que é necessário para conduzir um teste qualitativo de vedação com a solução Bitter.
- Instruções passo a passo fáceis de seguir.
- Ajuda a satisfazer os requisitos do programa de proteção respiratória.

# 0102

## BITTER® KIT FIT TEST

### 0102 BITTER QUALITATIVE FIT TEST KIT

- 0201 Capuz para o Teste (1)
- 0301 Nebulizador Número 1( Para o Teste de Sensibilidade)
- 0302 Nebulizador Número 2 ( Para o Teste de Vedação)
- 0503 Solução de Teste de Sensibilidade (6 Ampolas - 2.5 mL por Ampola)
- 0504 Solução de Teste de Vedação (6 Ampolas - 2.5 mL por Ampola)
- 0702 Instruções do Teste de Vedação Qualitativo

### NOTAS.

1. Use com qualquer respirador Moldex utilizando sempre filtros para partículas no mínimo PFF2.
2. Você deve obter aproximadamente 3 a 5 testes de vedação por tubo aplicador ou 18 a 30 testes por cada caixa de solução Bitter neste kit. ( # 0503 e # 0504)

### WARNING TO USER

1. Antes do uso, o usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso adequado do respirador, de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis, para o contaminante e o nível de exposição na área de trabalho atribuída.
2. As partículas e outros contaminantes que podem ser perigosos para a saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.

### AVISO IMPORTANTE DE GARANTIA LIMITADA AO COMPRADOR

Esta garantia limitada substitui as garantias de comercialização, adequação a fins específicos e todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Não há outras garantias que se estendam além da descrição aqui apresentada. Os padrões físicos e especificações da Moldex serão atendidos pelos produtos vendidos. Recursos exclusivos: os danos pelo descumprimento desta garantia limitada estão limitados à reposição de tal quantidade de Moldex, produtos comprovadamente fabricados com defeito. Exceto conforme estabelecido acima, a Moldex não será responsável por qualquer perda, dano ou responsabilidade, direta, indireta, incidental, especial ou consequencial, decorrente da venda, uso ou uso indevido, ou a incapacidade de usar produtos pelo do utilizador.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA MOLDEX

+1(800)421-0668ou +1(310)837-6500 ramal 512 ou E-mail: tech@moldex.com ou visite [www.moldex.com/br](http://www.moldex.com/br)



**MOLDEX**  
Ideas that wear well.®

**MOLDEX-METRIC, INC.**  
10111 Jefferson Blvd.  
Culver City, CA 90232  
TEL: +1 (800) 421-0668 or  
+1 (310) 837-6500  
FAX: +1 (310) 837-9563  
E-mail: [sales@moldex.com](mailto:sales@moldex.com)  
[www.moldex.com](http://www.moldex.com)

**CANADIAN CUSTOMER SERVICE**  
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/512  
Fax: +1 (310) 837-9563

**MOLDEX-METRIC, INC.**  
**AMÉRICA LATINA**  
TEL: +52 (442)231230  
FAX: +52 (442) 2341231  
Email: [Ventasamlat@moldex.com](mailto:Ventasamlat@moldex.com)  
[www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es)



Printed on Recycled Paper